

ЛАМПЫ ЩЕЛЕВЫЕ
ЩЛ-2, ЩЛ-2Б, ЩЛ-2Т

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.950.071 ТО

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Введение	3
2. Назначение	3
3. Технические данные	3
4. Состав лампы	4
5. Устройство и работа лампы	5
5.1. Принцип действия	5
5.2. Устройство базовой модели и комплекта сменных частей	6
5.3. Устройство комплекта приставок для фотографирования	9
5.4. Устройство комплекта приставок для определения внутриглазного давления	11
5.5. Устройство комплекта оптических насадок для работы вторым лицом	12
6. Маркирование и пломбирование	13
7. Тара и упаковка	13
8. Общие указания по эксплуатации	14
9. Указания мер безопасности	14
10. Подготовка к работе	14
11. Подготовка пациента	15
12. Порядок работы	16
13. Техническое обслуживание	20
14. Проверка технического состояния	22
15. Правила хранения и транспортирования	23
16. Перечень возможных неисправностей	24

Техническое описание предназначено для изучения работы ламп щелевых моделей ЩЛ-2, ЩЛ-2Б, ЩЛ-2Т*.

В техническом описании изложены назначение и технические данные ламп.

В инструкции по эксплуатации изложены сведения, необходимые для монтажа, подготовки к работе, правильной эксплуатации и поддержания ламп в постоянной готовности.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Лампа щелевая универсальная ЩЛ-2 предназначена для комплексного микроскопического исследования переднего и заднего отделов глаза, фотографирования переднего отдела глаза в рассеянном свете и определения внутриглазного давления.

Лампа щелевая ЩЛ-2Б (базовая модель) предназначена для визуальной биомикроскопии и офтальмоскопии глаз.

Лампа щелевая ЩЛ-2Т предназначена для визуальной биомикроскопии, офтальмоскопии глаза и определения внутриглазного давления.

Приборы работают при нормальной комнатной температуре в закрытых незапыленных помещениях.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Источник света — галогенная лампа КГМН 12 В, 30 Вт

Напряжение питания сети переменного тока, В 220 ± 22

Увеличение микроскопа переменное, крат от 8 до 40

Поле зрения микроскопа согласно увеличениям, мм

25—5

* В связи с возможными техническими усовершенствованиями текст описания и рисунки могут в отдельных деталях отличаться от выпущенных конструкций приборов.

Пределы изменения величины изображения щели, мм:	
по ширине	от 0,04 до 10—12
по высоте	1; 3 и 10—12
Поворот щели на $\pm 90^\circ$	
Угол поворота осветителя относительно плоскости симметрии лицевого устано- вки	$\pm 60^\circ$
Пределы изменения базы между окулярами бинокулярного микроскопа, мм	от 56 до 72
Величина перемещения, мм, не менее:	
координатного столика в направлении к лицевому устано- вки	65
координатного столика в направлении, пер- пендикулярном к лицевому устано- вки	116
щелевой лампы по высоте	30
подбородника по высоте	80
Габаритные размеры лампы без насадок и без офтальмологического столика, мм	530×420×360
Масса лампы без насадок и без офтальмологи- ческого столика, кг, не более	20
Масса комплектов:	
— приставок для фотографирования (без фотоаппарата), кг, не более	10
— приставок для определения внутриглаз- ного давления, кг, не более	2
— оптических насадок для наблюдения вто- рым лицом, кг, не более	5
Масса керато-пахометрической приставки, кг, не более	0,3
Масса головки с наклонной призмой, кг, не более	0,7
Средний срок службы должен быть 6 лет (без учета среднего ресурса фотокамеры).	

4. СОСТАВЫ ЛАМП

Лампа щелевая (базовая модель) ЩЛ-2Б содержит щелевую лампу с блоком питания, установленную на офтальмологический столик, и сменные части: кронштейн с отрицательной линзой и окуляр измерительный.

Лампа щелевая с тонометром ЩЛ-2Т содержит:

- базовую модель щелевой лампы ЩЛ-2Б;

— комплект приставки для определения внутриглазного давления.

Лампа щелевая универсальная ЩЛ-2 содержит:

- базовую модель щелевой лампы ЩЛ-2Б;
- комплект приставки для фотографирования переднего отдела глаза при рассеянном освещении;
- комплект приставки для определения внутриглазного давления;
- комплект оптических насадок для обеспечения рабо- ты на щелевой лампе вторым лицом;
- керато-пахометрическую насадку для определения толщины роговицы;
- головку с наклонной призмой для проектирования изображения горизонтальной щели снизу под 20° .

Конструкция универсальной щелевой лампы позволяет производить установку и смену вышеуказанных комплектов в процессе эксплуатации без применения специинструмента.

5. УСТРОИСТВО И РАБОТА ЛАМПЫ

5.1. Принцип действия

Базовая модель щелевой лампы представляет собой со- вокупность интенсивного источника света — осветителя и бинокулярного стереоскопического микроскопа с внутренним устройством для плавной смены увеличений.

На корпусе микроскопа имеются переходные посадочные места для крепления сменных частей.

В основу работы лампы положено получение светового пучка определенной формы, направляемого на исследуемый участок глаза, и наблюдение этого участка с помощью микроскопа.

Форма светового пучка задается диафрагмой (щелью), входящей в оптическую схему осветителя.

Оптическая схема осветителя строит изображение щелевой диафрагмы на расстоянии 89 мм от оптической оси осветителя.

Исследуемый участок глаза должен быть совмещен с изображением щелевой диафрагмы.

Изображение щелевой диафрагмы получается в виде ярко освещенной световой плоскости, которая может быть направлена на любую часть глаза.

Световая плоскость разрезает в исследуемой части глаза участок, размеры которого изменяются по ширине и дискретно по высоте.

Проходя через прозрачную среду глаза, световая плоскость как бы разрезает ее, давая «оптический срез». «Оптический срез» является главным объектом исследования с помощью бинокулярного микроскопа. Исследовать можно любую часть среза, для чего перемещают микроскоп и наводят его на различные зоны среза. Если имеются помутнения в роговице, хрусталике, стекловидном теле, то они выявляются в этом узком пучке света при рассматривании через бинокулярный микроскоп. Для рассматривания глазного дна служит офтальмоскопическая отрицательная линза, которая позволяет рассматривать участок глазного дна диаметром 5–6 мм.

5.2. Устройство базовой модели и комплекта сменных частей

Базовая модель щелевой лампы ЩЛ-2Б состоит из следующих сборочных единиц:

- стереомикроскопа;
- осветителя;

- координатного столика;
- блока питания;

— лицевого установка (подбородник с налобником и фиксационной точкой);

- офтальмологического столика.

Комплект сменных частей:

- кронштейн с отрицательной линзой;
- окуляр измерительный.

На офтальмологический столик 4 (рис. 1) устанавливается щелевая лампа с укрепленными на нем осветителем 12, бинокулярным микроскопом 21 и лицевым установом 5.

С нижней стороны к офтальмологическому столику крепится выдвижной блок питания БП 35.

На передней панели блока питания вынесены тумблер 36 включения в сеть и разъемы: Ш3 для подключения кабеля 3 осветителя, Ш4 для подключения кабеля фиксационной точки, шнур с вилкой 1 для подключения блока в сеть, а предохранители в сборку.

Вращая маховик винтового устройства офтальмологического столика или нажимая на соответствующие педали столика СГО-2, можно поднимать и опускать стереомикроскоп.

Щелевую лампу с лиценным установом устанавливают на офтальмологическом столике.

Координатный столик обеспечивает перемещение щелевой лампы в двух взаимно перпендикулярных направлениях горизонтальной плоскости, осуществляемое наклоном рукоятки 29, при точной наводке, а при переходе от исследования одного глаза к другому — посредством перемещения каретки рукой с последующей фиксацией положения рукояткой 32. Перемещение по высоте производится поворотом кольца 30.

В верхней части координатного столика крепится кронштейн 8 с бинокулярным микроскопом 21 и переходная втулка с осветителем 12.

Осветитель и бинокулярный микроскоп поворачиваются относительно кронштейна 33 и относительно друг друга в горизонтальной плоскости в пределах $\pm 60^\circ$ с последующей фиксацией разворота осветителя ручкой 6 и бинокулярного микроскопа ручкой 7. Угол разворота определяется по шкале 43 (рис. 2).

При пульсовом показании шкалы, т. е. при отсутствии разворота, осветитель и бинокулярный микроскоп оказываются закрепленными один относительно другого при помощи ручки фиксатора 7 (рис. 1).

Одним из основных узлов щелевой лампы является осветитель 12 (см. рис. 1).

В нем размещены: источник света лампа КГМ1 12-30, конденсор, механизм щели и диск с набором круглых диафрагм, обеспечивающие получение светового пучка определенного сечения, диск со светофильтрами, объектив и призма.

Для изменения размера щели по ширине служит ручка 10, а для изменения по высоте щели служит ручка 9, переключающая диск с набором диафрагм. Разворот щели в пределах $\pm 90^\circ$ производится ручкой 11. Смена светофильтров (цветных и нейтральных) производится поворотом

дисков 27, 28. Диски устанавливаются в фиксированном положении с индексом установленного светофильтра:

цветные с указанием окрашенної риски;

нейтральные риска — серая.

Риска с белым цветом в обоих дисках соответствует пластице из прозрачного стекла.

В верхней части осветителя устанавливаются сменные головки с призмой, для вертикальной и горизонтальной щели. Смена призменных головок осуществляется поворотом кольца 13 и поднятием вверх. При установке необходимо следить, чтобы штифт призменных головок входил в соответствующий паз в оправе.

Основная головка с призмой 16, установленная на осветителе, имеет разворот призмы на угол $\pm 6^\circ$ от вращения ручки 14. В головке с призмой установлена апертурная диафрагма, позволяющая уменьшить апертуру объектива с целью повышения качества оптических срезов. Размеры диафрагмы изменяются поворотом кольца 15.

Галогенная лампа КГМН 12-30 смонтирована в центрированном цоколе, что обеспечивает в эксплуатации замену запасной лампы без юстировки осветителя. Доступ к лампе осуществляется открытием крышки на корпусе осветителя.

Бинокулярный микроскоп представляет сложную оптико-механическую систему, состоящую из объектива, панкратической системы (плавной смены увеличений) и бинокулярной приставки.

Смена увеличений осуществляется вращением рукоятки 26 (см. рис. 1) с отсчетом по шкале, просматриваемой на корпусе.

Бинокулярная приставка 22 закреплена на корпусе посредством унифицированного посадочного соединения с захватом винтом 39 (см. рис. 2). В бинокулярной приставке закреплены объективы, призменная оборачивающая система и окулярные трубы.

Расстояния между окулярами меняются в пределах от 56 до 72 мм разворотом корпюсов призм 37, 38.

Окуляры 24, 25 (см. рис. 1) имеют диоптрийную подвижку в пределах ± 8 дптр.

В правом окуляре 24 и в левом 25 установлена сетка со штрихами для наводки на резкость. При необходимости можно установить окуляр 80 с сеткой (см. рис. 7) из комплекта.

Для установки окуляра на нужную диоптрийность необходимо вынуть его из тубуса бинокулярной приставки, повернуть шкалу на нужную диоптрию и затем установить в тубус, совместив индекс с меткой на тубусе.

Лицевой установка предназначен для фиксации головы пациента при обследовании. Он состоит из подбородника 70 (см. рис. 4) и налобника 66, которые смонтированы на двух вертикальных стойках 67 и 68, неподвижно укрепленных на плате 31 (см. рис. 1). К налобнику прикреплен копир 65 (рис. 4) для офтальмоскопической линзы.

Подбородник можно перемещать по стойкам в вертикальном направлении.

При нажатии на кнопку 61 (рис. 5) направляющая свободно скользит по стойке, при отпускании кнопки четко фиксирует положение подбородника.

Фиксационная точка 63 (рис. 4) установленная в верхней части налобника, позволяет фиксировать взгляд пациента в нужном для исследования направлении глаза.

Фиксационной точкой в этом устройстве служит свето-диод красного цвета;

Благодаря шарнирному устройству фиксационная точка может устанавливаться в различных положениях, относительно глаза пациента.

Для обследования глазного дна применяется кронштейн с офтальмоскопической линзой 18 (см. рис. 1) (отрицательная линза с оптической силой минус 57 дптр).

Кронштейн с линзой устанавливается на верхней пла-щадке бинокулярного микроскопа 21.

Для ввода линзы в оптический канал необходимо оправу 17 с линзой повернуть на 180° до фиксированного положения и нажать кнопку 19. Отрицательная линза выйдет из фиксированного положения относительно кронштейна 20 и под действием пружины переместится до упора в копир лицевого установка. В нерабочем положении линза отводится и поворачивается, не мешая таким образом работе осталь-ных частей лампы.

5.3. Устройство комплекта приставок для фотографи-рования

Комплект приставок для фотографирования содержит:

— фотокамеру «Зеница-МТ»;

— фотонасадку дляmono- и стереофотографирования с оптическим делителем с коэффициентом отражения 50%;

- фотонасадку для монофотографирования;
- оптический делитель с коэффициентом отражения 70%;
- фотовспышку;
- блок питания БПФ ЦЛ-2;
- кабель соединительный;
- педаль.

Универсальная малоформатная медицинская фотокамера «Зеница-МТ» предназначена для фотогерегистрации на черно-белую и цветную 35 мм фотопленку различных частей глаза при совместной работе с офтальмологическими приборами, в частности и со ЦЛ-2.

Соединение фотокамеры с щелевой лампой производится через унифицированное для всех частей комплекса присоединительное устройство с зажимом на фотонасадке.

Подробное описание работы фотокамеры приведено в паспорте на фотокамеру «Зеница-МТ».

Фотонасадка для моно- и стереофотографирования 51 (см. рис. 3) представляет собой устройство, содержащее оптический делитель с коэффициентом отражения 50%, объектив, диск с диафрагмами, зеркало и механизм переключения на режимы моно и стерео. Переключение диафрагм осуществляется поворотом диска 49.

Переключение наmono и стерео осуществляется перемещением оправы 46 с фотокамерой до фиксированного положения. При этом в указателе 47 появляются буквы «М» или «С», а в механизме переключаются соответствующие диафрагмы.

Соединение фотонасадки со щелевой лампой и фотокамерой производится через унифицированные для всего комплекса присоединительные устройства с зажимом.

Фотонасадка для монофотографирования 60 (рис. 7) представляет собой переходное устройство от оптического делителя с коэффициентом отражения 70%, установленного на щелевой лампе к фотокамере, и содержит объектив и зеркало.

Крепление фотонасадки в переходном оптическом делителе осуществляется накидной гайкой, а крепление фотокамеры — через унифицированное присоединительное устройство с зажимом винтом.

Фотовспышка 54 (см. рис. 3) представляет собой импульсный осветитель, содержащий переходной кронштейн 52, устанавливаемый на корпусе бинокулярного микроскопа с

зажимом винтом 53, на котором крепится сетевая электроФотовспышка «СЭФ-3» с помощью стандартного посадочного паза, предусмотренного для всех видов электрофотовспышек, выпускаемых промышленностью.

Для обеспечения питания фотокамеры и электрофотовспышки предназначен блок питания БПФ 59 (см. рис. 4).

На передней панели вынесены: тумблер включения сети 55, разъемы для подключения фотовспышки 58, педали 56 и фотоканала 57.

На задней панели размещены предохранители и вывод шнура с вилкой для подключения блока в сеть.

Управление процессом фотографирования производится включением через ножную педаль 44 (см. рис. 3) (педаль на столе показана условно).

5.4. Устройство комплекта приставки для определения внутриглазного давления

Комплект приставки для определения внутриглазного давления содержит:

- апplanationный тонометр;
- тарировочное устройство;
- оптический клин.

Тонометр 74 (см. рис. 5) крепится к корпусу бинокулярного микроскопа через переходную площадку.

Направляющие кронштейны тонометра вставляются в соответствующие пазы площадки корпуса бинокулярного микроскопа и зажимаются винтами 71.

Рабочим элементом тонометра является оптический клин 75, выполненный в виде призменного устройства, который непосредственно контактирует с роговицей глаза.

Через бинокулярный микроскоп щелевой лампы просматривается не целый кружок сплюсывания, а две полуокружности, смешенные относительно друг друга (рис. 8).

Диаметр участка апplanationа (в процессе измерения патичного внутриглазного давления) постоянен и равен $\varnothing 3,06$ мм.

Вращением ручки 72 (см. рис. 5) в поле зрения бинокулярного микроскопа наблюдаем увеличение и сближение между собой двух полуокружностей. Сила нажима на глаз увеличивается до тех пор, пока темно-синие полуокружности, определяющие площадку сплюсывания роговицы, не соприкоснутся друг с другом. В момент соприкосновения полуокружностей прекращают вращение ручки 72 и по шкале 73 определяют значение внутриглазного давления.

5.5. Устройство комплекта оптических насадок для работы вторым лицом

Комплект приставки оптических наблюдательных насадок для работы вторым лицом содержит:

- монокулярную трубку;
- бинокулярную трубку;
- оптический делитель с коэффициентом отражения 50%.

Монокулярная трубка 77 (рис. 6) состоит из призмы Дове, двух объективов и призмы обворачивающей системы и окуляра, аналогичного окулярам бинокулярной приставки с диоптрийной наводкой ± 8 дптр. Призма Дове имеет возможность разворота путем вращения кольца 83 (рис. 7). Бинокулярная трубка 79 (см. рис. 6) по оптической схеме аналогична монокулярной, только имеет призму для разделения изображения на бинокулярное и бинокулярную насадку.

Устанавливаются наблюдательные трубы в оптический делитель 78, входящий в комплект ЩЛ-2, и крепятся накидной гайкой.

Монокулярная и бинокулярная трубы имеют возможность установки в положение, удобное для наблюдения за счет разворота относительно пазов.

Для наблюдения вторым лицом или фотогенерации переднего отдела глаза в бинокулярный микроскоп вводятся оптические делители 62 и 78 (см. рис. 7) с коэффициентом отражения 50 и 70% для фотографирования с получением моноспектров и наблюдения.

Оптический делитель представляет собой переходную оправу, в которую установлены призменные делители. Устанавливаются оптические делители перед бинокулярной приставкой через унифицированное для всех частей присоединительное устройство и закрепляются винтом.

5.6. Устройство керато-пахометрической приставки

Для измерения толщины роговой оболочки и элементов переднего отдела глаза служит керато-пахометрическая приставка 42 (см. рис. 2), которая устанавливается на корпус бинокулярного микроскопа.

При установке керато-пахометрической приставки на корпус в правый канал введены две плоско-параллельные пластины, наложенные друг на друга и расположенные перпендикулярно к оптической оси правого канала.

Линия раздела пластинок совпадает с оптической осью. Нижняя пластина неподвижна и дает несмещаемое изображение оптического сечения роговой оболочки, а верхняя — поворачивается вокруг вертикальной оси. Верхняя пластина дает смещаемое изображение, которое можно совместить с неподвижным так, что изображения передней и задней поверхности роговой оболочки окажутся в одной точке.

Поворот верхней пластины осуществляется вращением ручки 40, а по показанию шкалы 41, установленной против индекса, определяют величину смещения изображения в мм (например толщину роговой оболочки глаза).

5.7. Устройство головки с наклонной призмой

Головка с наклонной призмой 81 (см. рис. 7) устанавливается на осветитель вместо основной головки с призмой с помощью резьбового кольца 13 (см. рис. 1) и позволяет направить световой пучок как в горизонтальной плоскости, так и под углом 20° снизу. Наклон призмы осуществляется вращением кольца 87 (см. рис. 7), при этом отсчет угла наклона определяется по шкале 86.

6. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Щелевая лампа и блоки питания имеют производственные марки с обозначением товарного знака завода-изготовителя, шифра и номера. Номер прибора должны иметь все сменимые части (включая комплекты). Этот же номер указывается в паспорте. Ящик с установленными в него сборочными единицами закрывается и пломбируется.

7. ТАРА И УПАКОВКА

Щелевая лампа и все комплекты упакованы согласно комплекту тары в фанерные ящики типа III по ГОСТ 5959-89, в деревянные футляры типа III по ГОСТ 14225-77, в коробки тип I по ГОСТ 12301-72 и затем в выложенный битумированной бумагой по ГОСТ 515-77 и обтянутый упаковочной стальной лентой ГОСТ 3560-73 ящик типа VI-I по ГОСТ 2991-76.

8. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

8.1. При установке щелевой лампы удалите избыток консервационной смазки со всех узлов.

8.2. Наружные поверхности прибора протрите тампоном, смоченным 3% раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос», «Новость», а затем тампоном, смоченным 1% раствором хлорамина. Тампоны должны быть отжаты.

8.3. Щелевая лампа представляет собой оптический прибор, требующий бережного и осторожного обращения. Необходимо оберегать прибор от ударов, толчков и механических воздействий.

Необходимо также бережно обращаться с оптическими деталями (не трогать руками наружные оптические поверхности), не крутить без надобности вращающиеся детали и не нажимать кнопки.

8.4. В нерабочем состоянии щелевая лампа должна быть накрыта соответствующим чехлом.

8.5. Неиспользуемые комплекты приставок, сменные и запасные части должны храниться в укладочных ящиках.

9. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

9.1. Щелевая лампа через блок питания БП и блок питания БПФ должна быть подсоединенена к заземляющей шине посредством соединительного шнуря с вилками ВШ-ц-20-00-10/250. Вилки должны включаться в розетки типа РШ-ц-20-01-10/250, устанавливаемые потребителем, третья клемма каждой из розеток должна быть подсоединенна к заземляющей шине.

9.2. Работа со снятыми кожухами блоков питания не допускается.

9.3. Замену ламп производите при выключенном блоке питания.

9.4. Во избежание травм соблюдайте меры предосторожности при переносе прибора.

10. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Смонтированную щелевую лампу установите на офтальмологическом столике 4 (см. рис. 1) так, чтобы подвижная часть координатного столика занимала среднее положение

(рукойтка 29 должна быть расположена вертикально), и, при необходимости, закрепите шурупами, предварительно сняв 4 заглушки.

С нижней стороны офтальмологического столика закрепите направляющие шурупами (из комплекта) согласно эскиза, (рис.12) ввиньте блок питания БП и установите БПФ (если предполагается проводить фотографирование).

Блоки питания можно установить на отдельном столе вблизи рабочего места врача.

Включите штепсельные вилки в розетки. Подключите кабель осветителя и вилку шнура фиксационной точки в разъем к блоку питания БП.

К бинокулярному микроскопу подсоедините необходимые переходные или сменные части, используя предусмотренные инструкцией посадочные места или специальное унифицированное крепление.

При таком положении прибора можно производить исследование глаза. Включите тумблер 36 СЕТЬ на блоке питания БП. *(рис. 1)*

Наблюдая в бинокулярный микроскоп включенной щелевой лампы, добейтесь наилучшего освещения исследуемого участка глаза, этого можно добиться:

— перемещением бинокулярного микроскопа на координатном столе;

— поворотом осветителя щелевой лампы;

— поворотом головной призмы осветителя щелевой лампы.

II. ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТА

Специальной подготовки больного для исследования на щелевой лампе не требуется.

В отдельных случаях может возникнуть необходимость в исследовании при широком зрачке, что общепринято для врачей-офтальмологов и не требует специального отражения в техническом описании и инструкции по эксплуатации прибора.

Исследуемый глаз анестезируется инстилляцией 0,5% раствора дикамина. Затем на поверхность глазного яблока (в 2–3 мм от верхнего лимба роговицы) посредством стеклянной палочки, слегка прикасаясь, наносят небольшое количество однопроцентного раствора флюoresцена. Перед прикосновением к поверхности глаза стеклянную палочку

слегка встряхивают, с целью удаления излишков флюоресценции.

После этого пациент делает несколько мигательных движений веками. Не следует наносить на поверхность глазного яблока слишком большое количество раствора флюоресценина, так как это затрудняет измерение внутриглазного давления.

Сплющенный участок глаза просматривается в синем свете. Для этого в ход лучей, попадающих в глаз пациентов, вводится синий светофильтр. При этом площадка сплющивания, окрашенная флюоресцином слезной жидкости, выглядит более темной на зелено-желтом фоне.

12. ПОРЯДОК РАБОТЫ

12.1. Наблюдение передней части глаза

Голову пациента установите так, чтобы она плотно прилегала к подбороднику и налобнику лицевого установка 5 (см. рис. 1). Глаз пациента должен находиться на уровне основной головки призмы 16, что достигается подъемом подбородника (нажатием на кнопку).

Разворотом тубусов бинокулярной приставки 22 установите окуляры так, чтобы они соответствовали расстоянию между зрачками наблюдателя, а сами окуляры 24, 25 — на резкое изображение сетки.

Включите тумблер 36 блока питания БП 35. Перемещая щелевую лампу с помощью рукоятки 29, установите резкое изображение щели на глазе пациента. Поворотом осветителя 12 и ручкой разворота призмы 14 совместите изображение щели с нужным участком поля зрения микроскопа, а вращая рукоятку 26 микроскопа, подберите необходимое увеличение микроскопа. По угловым шкалам на кронштейне 8 определите углы поворота осветителя 12 и микроскопа, а также увеличение микроскопа, если необходимо для истории болезни.

При вращении одной ручки 11 осветителя изображение щели поворачивается на угол $\pm 90^\circ$, а через бинокулярный микроскоп наблюдайте один за другим оптические срезы (ширина щели минимальная) в разных плоскостях исследуемого глаза.

Для исследования глаза пациента в горизонтальной плоскости (щель горизонтальна) используйте другую головку осветителя 81 (см. рис. 7).

12.2. Наблюдение сетчатки глаза

Для исследования сетчатки глаза установите офтальмоскопическую линзу 18 (см. рис. 1) на корпус бинокулярного микроскопа. Направьте свет от осветителя на офтальмоскопическую линзу для освещения глаза (глазного дна).

Для рассматривания различных участков сетчатки взгляда пациента направляйте с помощью узла фиксационной точки 63 (см. рис. 4).

Сине-зеленый светофильтр, расположенный в диске 28 (см. рис. 1) осветителя, позволяет производить наблюдение сетчатки в бескрасном свете.

12.3. Определение толщины роговой оболочки

Для определения толщины роговой оболочки используется керато-пахометрическая приставка 42 (см. рис. 2), устанавливаемая на корпусе бинокулярного микроскопа со стороны объектива. Осветитель и бинокулярный микроскоп должны быть развернуты друг относительно друга на угол 90° .

Керато-пахометрическая приставка состоит из двух стеклянных плоско-параллельных пластинок: подвижной и неподвижной. При вращении ручки 40 керато-пахометрической приставки (при этом вращается подвижная пластина) половина поля зрения микроскопа смешается, что можно наблюдать в правый окуляр микроскопа 24 (см. рис. 1). При вращении ручки 40 (см. рис. 2) керато-пахометрической приставки от 0 до 1° изображение смешается на 1 мм.

При наблюдении в микроскоп оптического среза роговой оболочки, вращайте рукоятку керато-пахометрической приставки и совмещайте изображение передней с задней поверхностью роговой оболочки. По углу отклонения пластиинки, т. е. по шкале 41 барабана керато-пахометрической приставки, определите толщину роговой оболочки.

12.4. Работа щелевой лампы при фотографировании

Установите фотокамеру «Зеница-МТ» на фотонасадку ФСМ 51 (см. рис. 7) для получения моно- или стереоснимков, путем перемещения самой фотокамеры. Затем установите

фотовспышку 54 (см. рис. 3) и фотонасадку ФСМ с фотокамерой «Зеница-МТ» на щелевую лампу.

Правый и левый окуляры микроскопа установите на резкое изображение своих сеток, установите необходимое увеличение микроскопа. Перемещая координатный столик рукояткой 29 (см. рис. 1), добьтесь резкого изображения исследуемого объекта. Съемка осуществляется нажатием педали 44 (см. рис. 7) или нажатием пусковой кнопки на фотокамере «Зеница-МТ».

Для получения только мононимков используйте фотонасадку ФМ 60, которая устанавливается на щелевую лампу через оптический делитель 50 или 70% (см. рис. 7 поз. 78 и 62).

12.5. Измерение внутрглазного давления

Установите тонометр 74 (см. рис. 5) на кронус микроскопа щелевой лампы. Придав определенное направление взору пациента, перемещайте бинокулярный микроскоп и совмещайте центральную часть оптического клина тонометра с центральной зоной роговицы исследуемого глаза. При наблюдении через левый окуляр 25 (см. рис. 1) микроскопа должны быть видны две полуокружности темно-синего цвета (введен синий светофильтр), отделенные друг от друга интервалом (см. рис. 8). Это указывает на правильную исходную установку тонометра относительно глаза.

Участок сплющивания роговицы будет наблюдать в поле зрения микроскопа при увеличении 10^{\times} только в том случае, если оптический клин производит определенное давление на глаз, образуя участок сплющивания. Поэтому создайте предварительное измерительное усилие 0,5 г, для чего (перед измерением) установите стрелку шкалы тонометра на 2—3 деления с помощью ручки 72 (см. рис. 5).

Далее произведите точную фокусировку микроскопа так, чтобы можно было с оптимальной резкостью видеть внутренний край окрашенного флюoresценном кольца слезной жидкости. После соприкосновения клина с глазом иногда приходится изменять направление пучка света, идущего от осветителя щелевой лампы, чтобы получить наилучшие условия освещения. Затем, наблюдая в левый окуляр микроскопа, плавно поворачивайте ручку 72 шкалы тонометра. При этом увеличивается сила нажима оптического клина на роговицу глаза и площадка сплющивания соответственно

увеличивается. Силу нажима на глаз увеличивайте до тех пор, пока темно-синие полуокружности, определяющие площадку сплющивания роговицы, не соприкоснутся друг с другом (см. рис. 8), т. е. образуется фигура по конфигурации близкая к синусоиде. По шкале 73 (см. рис. 5) тонометра определяют величину истинного внутрглазного давления.

На рис. 8 можно видеть площадку сплющивания роговицы (темно-синий цвет) и кольцо, образованное слезной жидкостью, (зелено-желтый цвет), которое не имеет никакого значения для измерения утолщенного участка роговицы, так как ширина кольца меняется от случая к случаю.

В процессе измерения внутрглазного давления может оказаться, что ось оптического клина смешена относительно центральной зоны роговицы исследуемого глаза. В поле зрения левого окуляра микроскопа будут наблюдаться две полуокружности разной величины по высоте. В этом случае следует, поднимая или опуская подбородник, добиться правильного относительного расположения глаза и оптического клина (полуокружности должны быть одинаковы по своей площади).

В случае астигматических глаз поверхность сплющивания имеет форму эллипса и через микроскоп будут наблюдаться полуокружности неправильной формы (вытянутые по высоте или сплющенные). Для исправления этого поверните оптический клин вокруг своей оси так, чтобы линия, разделяющая оптический клин на две части в поле зрения микроскопа, находилась относительно главной оси эллипса примерно под углом 45°.

В процессе измерения внутрглазного давления следите, чтобы веки не касались оптического клина и ресницы не попадали между оптическим клином и роговицей.

Чтобы избежать движения век, оба глаза должны быть анестезированы.

После окончания тонометрии в конъюнктивальный мешок закапывают по 2 капли 30-процентного раствора альбуцида.

12.5.1. Проверка работоспособности тонометра

Для проверки соответствия усилия, приложенного к оптическому клину, и показания шкалы тонометра служит тарировочное устройство 82 (см. рис. 7). Тарировочное устройство устанавливается на тонометре 74 (см. рис. 5),

таким образом, чтобы скоба с шариком касалась рабочей поверхности оптического клина.

Усилие, приложенное к чашке тарировочного устройства (набор гирь Г-4-110 ГОСТ 7328-73) должно соответствовать показанию шкалы тонометра. При соприкосновении неиспользованного тарировочного устройства с оптическим клином тонометра система находится в равновесии, о чем говорит вертикальное расположение стрелки тарировочного устройства. При нагрузке тарировочного устройства гирями равновесие нарушается, о чем говорит отклонение стрелки. Вращая ручку тонометра 72, добиваются равновесия системы, при этом стрелка тарировочного устройства должна встать в исходное положение.

12.6. Тубусы для совместного наблюдения на щелевой лампе

На микроскоп щелевой лампы установите оптический делитель 50% (или 70%) 62 и 78 (см. рис. 7), а к нему подстыкуйте моно-77 или бинокулярный тубус 79 (можно оба). Изображение объекта можно наблюдать через микроскоп и через моно- и бинокулярный тубусы, предварительно выставив окуляры тубусов по глазу.

13. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

13.1. Общие указания

13.1.1. Техническое обслуживание проводят с целью обеспечения бесперебойного повышения эксплуатационной надежности и эффективности использования щелевой лампы.

13.1.2. Техническое обслуживание осуществляется в соответствии с «Общими указаниями по эксплуатации» и «Указаниями мер безопасности» медицинским обслуживающим персоналом.

13.1.3. Порядок и содержание операций:

- 1) Распаковка и монтаж офтальмологического (приборного) столика.
- 2) Установка щелевой лампы и блока питания на приборном столике (см. раздел 10).
- 3) Соединение штепсельных разъемов.

13.2. Техническое освидетельствование

13.2.1. Устранение неисправностей щелевой лампы производят с учетом рекомендаций раздела «Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей» с

соблюдением мер безопасности, изложенных в разделе «Указания мер безопасности».

13.2.2. Все неисправности и работы, связанные с техническим обслуживанием, должны быть отмечены в карточках «Учет неисправностей при эксплуатации» (табл. 1) и «Учет технического обслуживания» (табл. 2).

13.3. Текущий ремонт

При обнаружении неисправностей, устранение которых связано с разборкой, щелевую лампу или любую сборочную единицу, входящую в комплект, необходимо направить в ремонтное предприятие «Медтехника» для ремонта. Ремонт производится по ремонтной документации на щелевую лампу.

УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 1

Дата и время отказа изделия. Режим работы	Характер неисправности	Причина неисправности. Количество часов работы отказавшего элемента	Принятые меры по устранению неисправности	Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности	Примечание

УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 2

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом обслуживании	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

14. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

14.1. Контроль технического состояния перед использованием

14.1.1. Внешний осмотр щелевой лампы и комплекта клиньев.

14.1.2. Проверка комплектности щелевой лампы.

14.1.3. Проверка измерения усилий тонометра с помощью тарировочного устройства.

14.1.4. Проверка совмещения рабочей поверхности клина тонометра с предметной плоскостью микроскопа.

14.1.5. Проверка включения блока питания БП совместно со щелевой лампой и лицевым установом.

14.1.6. Проверка включения блоков питания БП и БПФ со щелевой лампой, комплектом для фотографирования и лицевым установом.

14.2. Текущий контроль технического состояния

14.2.1. Операции контроля технического состояния перед использованием.

14.2.2. Наружный и внутренний осмотр основных составных частей и комплектов щелевой лампы (без разборки).

14.2.3. Проверка действия основных механизмов щелевой лампы.

14.2.4. Проверка получения моноснимков и стереоснимков с помощью комплекта приставок для фотографирования.

Текущий контроль технического состояния проводят после использования источников света (галогенных ламп) из ЗИПа.

14.3. Плановый контроль технического состояния

14.3.1. Операции текущего контроля.

14.3.2. Тщательный контроль состояния всех сборочных единиц, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождаются частичной разборкой щелевой лампы.

14.3.3. Выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии.

14.3.4. Осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП.

14.3.5. Проверка наличия состояния и ведения эксплуатационной документации.

14.3.6. Плановый контроль технического состояния проводить один раз в два года.

15. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Щелевые лампы должны храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 10 до 35 °C с относительной влажностью не более 80% при температуре 25 °C.

Воздух в помещении не должен содержать агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

Щелевые лампы можно перевозить любым видом закрытого транспорта при температуре от минус 50 до + 50 °C.

При перевозке самолетом или морским транспортом щелевые лампы укладывают в полиэтиленовые мешки с силикагелем.

16. П Е Р Е Ч Е Н Ъ

наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
Не подсвечивается щель	Перегорела лампочка в осветителе. Вышел из строя предохранитель.	Отверните винт из корпуса осветителя, откройте крышку и замените перегоревшую лампочку новой или предохранитель из комплекта запасных.
Не светится фиксионная точка Под действием собственной массы фиксионное устройство падает	Плохой контакт в шарнире.	Поверните светодиод на крышке шарнира, предварительно нажав на диод.

Р И С У Н К И

Общий вид щелевой лампы ЩЛ-2Б (базовая модель)


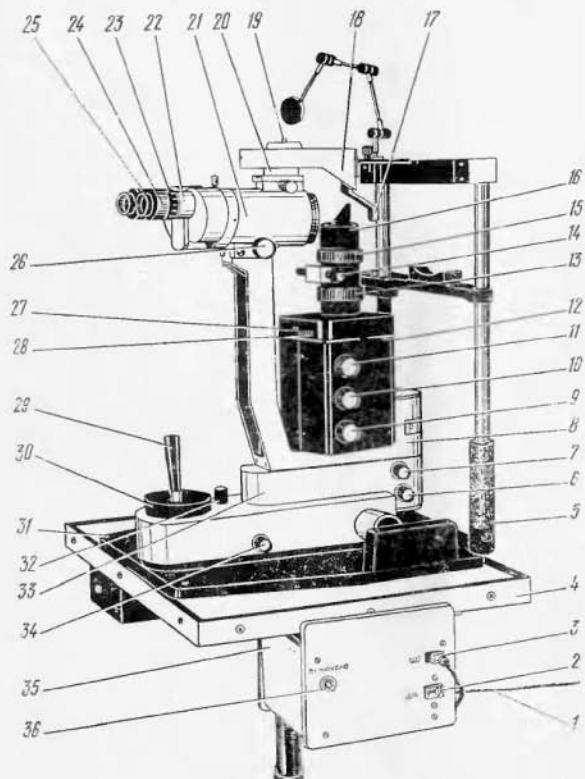


Рис. 1

1 — шнур с сетевой вилкой; 2 — разъем фиксационной точки; 3 — кабель осветителя; 4 — офтальмологический столик; 5 — лицевой установка; 6 — ручка зажима осветителя; 7 — ручка зажима кронштейна с бинокуляром; 8 — кронштейн; 9 — ручка регулировки щели по высоте; 10 — ручка регулировки щели по ширине; 11 — ручка разворота щели; 12 — осветитель; 13 — кольцо для крепления сменных головок; 14 — ручка разворота призмы; 15 — кольцо регулировки апертурной диафрагмы; 16 — основная головка с призмой; 17 — оправа с линзой; 18 — кронштейн с отрицательной линзой (офтальмоскопической); 19 — кнопка; 20 — кронштейн; 21 — бинокулярий микроскоп; 22 — бинокулярия приставка; 23 — кольцо; 24 — правый окуляр; 25 — левый окуляр; 26 — рукоятка плановой регулировки увеличения; 27, 28 — диски фильтров; 29 — рукоятка перемещения стола; 30 — кронштейн; 31 — плита стола; 32 — рукоятка фиксации положения стола; 33 — кронштейн; 34 — рукоятка регулировки яркости осветителя; 35 — блок питания БП; 36 — тумблер включения сети


Вид микроскопа щелевой лампы с керато-пахометрической приставкой со стороны бинокуляра

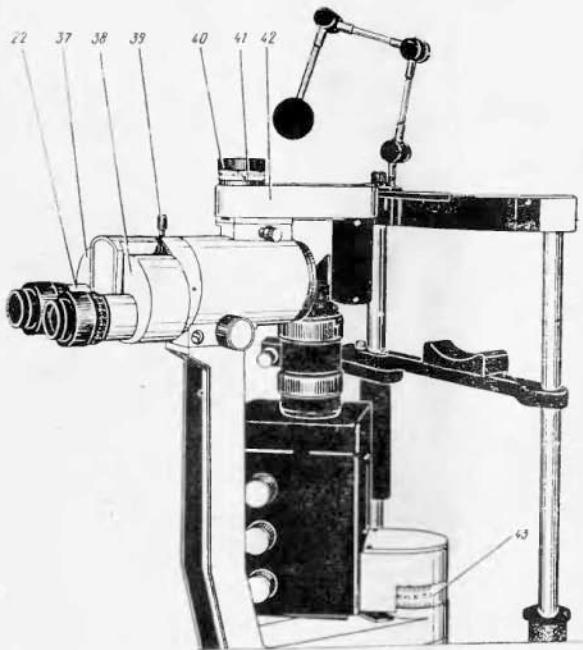

22 — бинокулярная приставка; 37 — корпус призмы; 38 — корпус призмы; 39 — винт; 40 — ручка; 41 — шкала; 42 — керато-пахометрическая приставка; 43 — шкала

Рис. 2


Общий вид щелевой лампы с фотонасадкой ФСМ для фотографирования

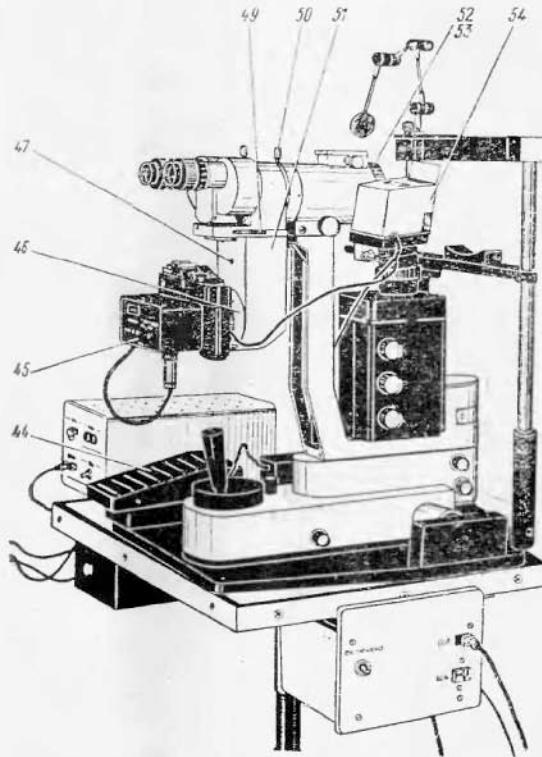

44 — педаль; 45 — фотокамера; 46 — оправа; 47 — указатель; 49 — диск переключения диафрагм; 48, 50 — винты; 51 — фотонасадка для моно- и стереофотографирования; 52 — кронштейн; 53 — винт; 54 — фотодиэлектропечька СЭФ-3

Рис. 3


Общий вид щелевой лампы с фотонасадкой
для фотографирования

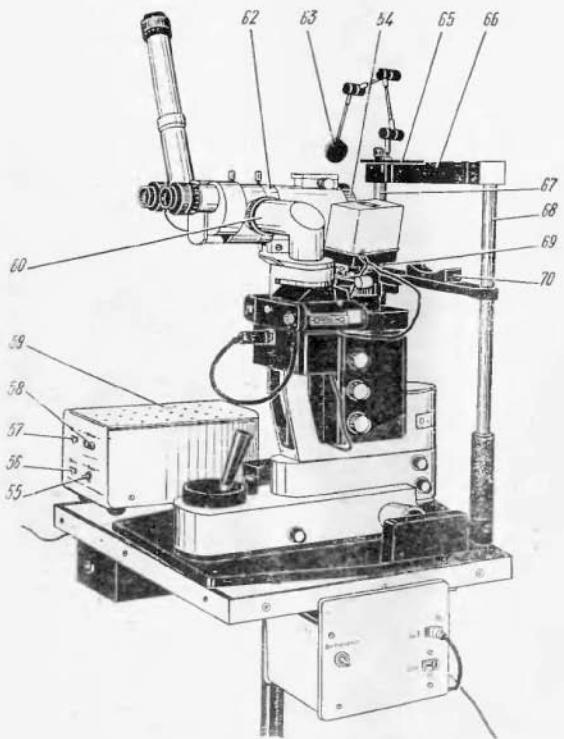

55 — тумблер; 56 — разъем для подключения педали; 57 — разъем для подключения фотокамеры; 58 — разъем для подключения фотоаппарата; 60 — фотонасадка для монографирования; 62 — оптический делитель; 63 — фиксационная точка; 65 — конус; 67—68 — стойки; 70 — подбородник

Рис. 4


Вид щелевой лампы с тонометром

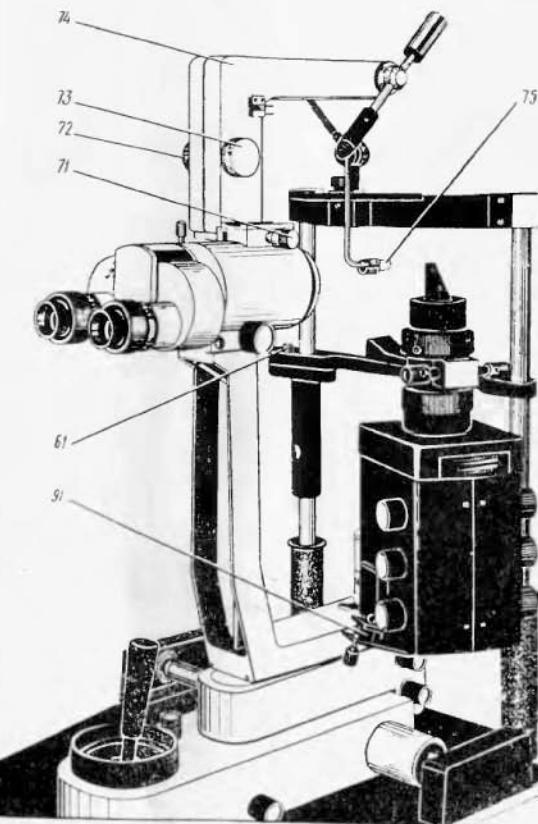

61 — кнопка; 71 — винт; 72 — ручка; 73 — шкала; 74 — тонометр;
75 — оптический клин

Рис. 5

Общий вид щелевой лампы с комплектом
оптических насадок

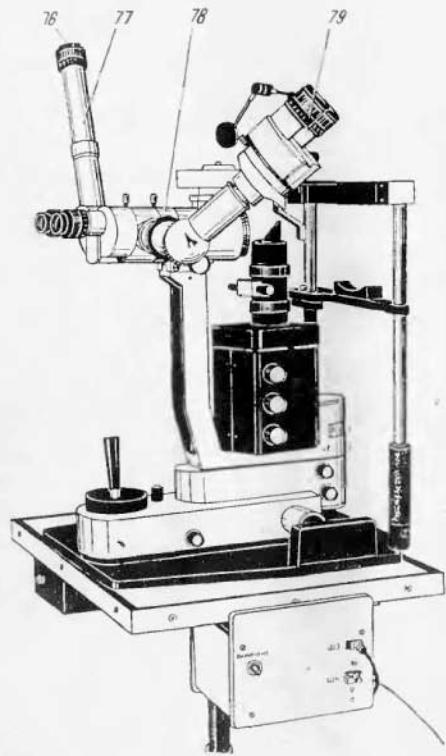

76 — окуляр; 77 — монокулярная трубка; 78 — оптический деягатель
79 — бинокулярная трубка

Рис. 6

Общий вид комплектов и насадок к щелевой лампе ЦЛ-2

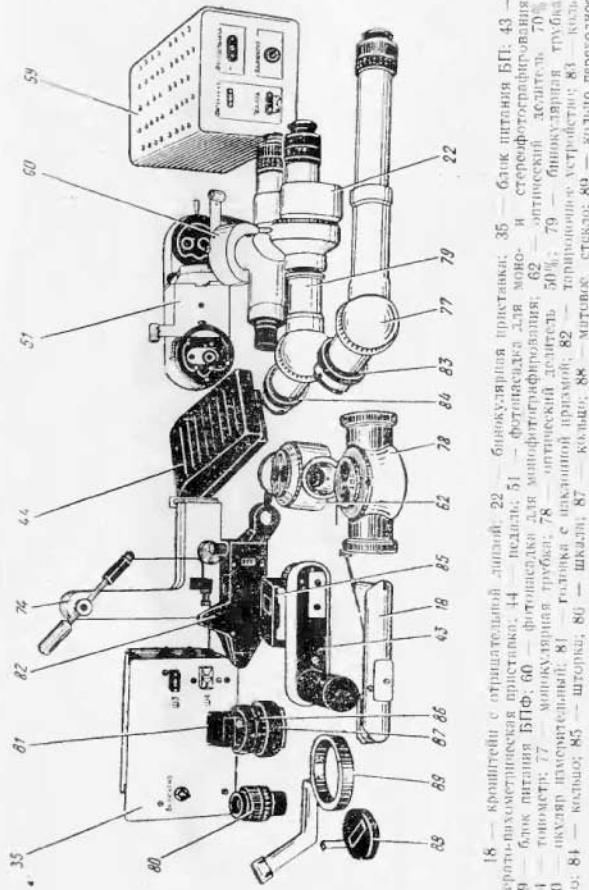


Рис. 7

Вид поля зрения при измерении внутрглазного давления


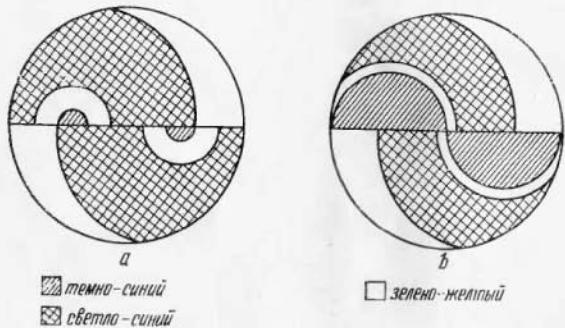


Рис. 8


Общий вид комплекта приставок для фотографирования

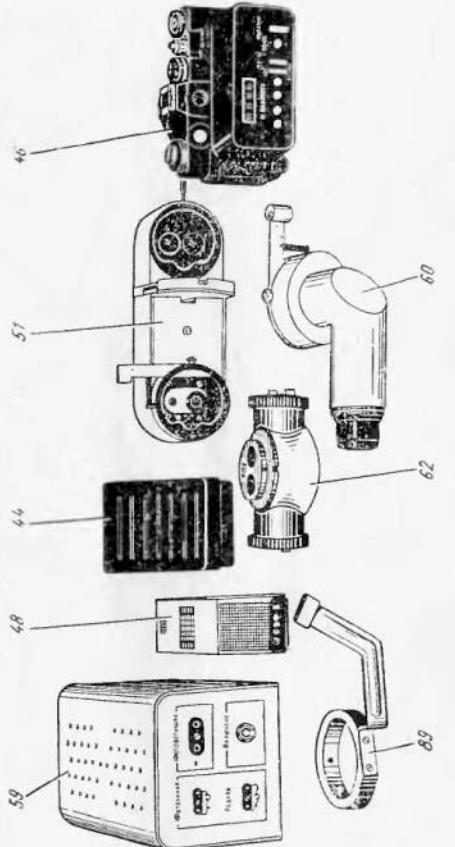

44 — пелёнка; 46 — фотокамера «Зеник-МТ»; 48 — фокусировочный; 51 — фотомонитор для монот и стереофотографирования; 58 — батарея питания БПФ; 60 — фотоприемник для монофотографирования; 62 — оптический линзоступень 70%; 63 — колпак переходной для фотографии

Рис. 9


Общий вид комплекта приставок для определения внутрглазного давления

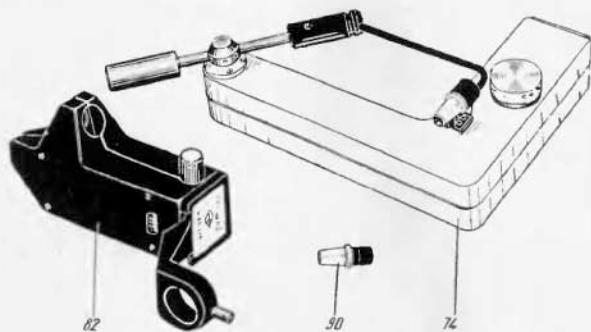

74 — тонометр; 82 — тарировочное устройство; 90 — оптический клив

Рис. 10

Общий вид комплекта оптических насадок

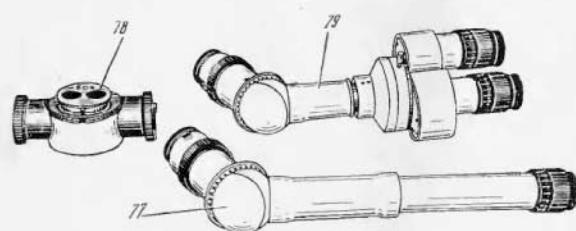

77 — монокулярия трубка; 78 — оптический делитель; 79 — бинокулярия трубка

Рис. 11

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

К Вашему описанию приложен вкладыш к разделу 6 (Подготовка изделия к работе) паспорта Ц-5048 ПС на столик для офтальмологических приборов СГО-2 Елецкого завода медицинского оборудования. Паспорт находится в упаковке столика. При пуске столика в эксплуатацию следует дополнительно руководствоваться п. 6.3.


6.3. При поступлении к потребителю столика для офтальмологических приборов, гидравлического, СГО-2 с сухим картером необходимо произвести следующие операции: (рис. 13).

- отвернуть гайку 17 (см. рис. в паспорте на столик);
- приподнять крышку 10;
- залить компрессорное масло К-19 ГОСТ 1861-73 из тары (объем 1 л);

— нажатием несколько раз на педаль подъема 12 приподнять панель I в верхнее положение. Отвернуть винт 18 и нажатием руки на панель I произвести её опускание до крайнего нижнего положения. Нажать на педаль подъема 12 до упора, затем снять нагрузку с педали (операцию повторить 4—5 раз), тем самым произвести выпуск воздуха из системы. Завернуть винт 18;

- поставить крышку 10, завернуть гайку 17.
- Изделие подготовлено к работе.

Эскиз крепления кронштейнов
для блока питания.

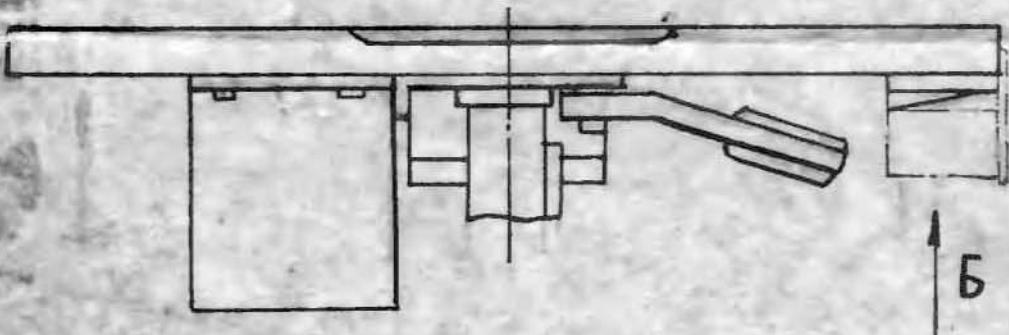

Вид Б

Направляющая

8-203.946

Направляющая

8-203.946-01

Шайбы А3x16.019

ГОСТ 1144-70.

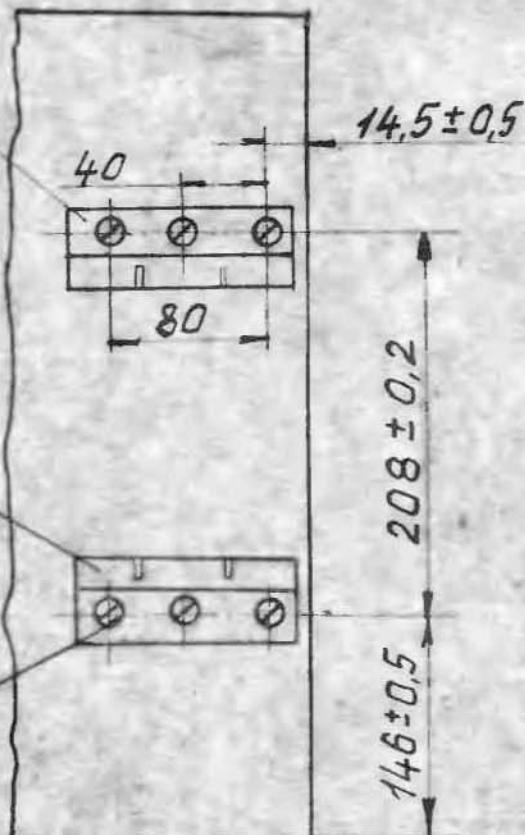


РИС. 12

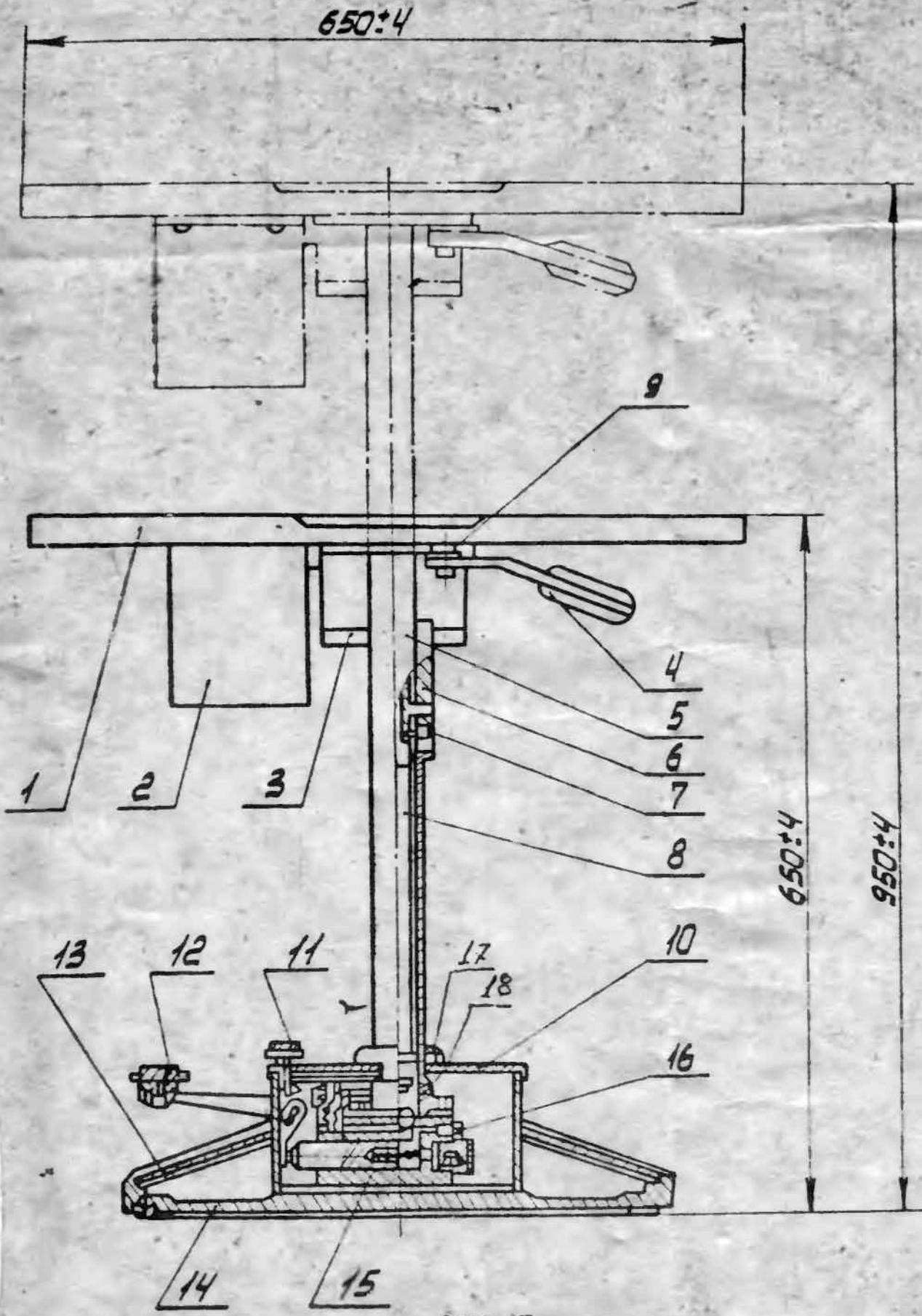


Рис. 13